

SUPERPOST® OPAQUE

Pinos de Fibra de Vidro
Uno Único – Não Estéril – Uso Profissional
Pinos Intra radiculares Odontológicos – 2101135

Versão Inicial

INSTRUÇÕES DE USO

Técnica de uso:

1 - Sobrepor o pino sobre a radiografia do dente e selecionar um tamanho ligeiramente mais largo do que a luz do canal radicular;

2 - Com uma broca de largo, de tamanho compatível com a largura do pino, remover até 2/3 da guta percha do canal deixando um mínimo entre 4 a 5mm de remanescente;

3 - Certifique-se de não sobrar guta nas paredes laterais;

4 - Provar o pino no conduto. Ele pode ficar discretamente frouxo;

5 - Se o pino não descer totalmente no conduto este poderá ser ligeiramente alargado com a mesma broca ou a ponta do pino ser afilada. Não desgastar o pino na lateral;

6 - Uma vez ajustado no canal o pino poderá ser cortado no comprimento se for necessário, ou este passo pode ficar para depois da cimentação; O corte pode se dar com discos ou brocas diamantadas sob refrigeração;

7 - Antes da cimentação lavar o conduto com EDTA e enxaguar com água abundante. Em seguida, secar bem;

8 - Recomendável aplicar silano sobre o pino. Usar de acordo com as instruções do fabricante;

9 - A cimentação convencional se dá com adesivo hidrofóbico dual + cimento resinoso dual (siga as instruções do fabricante!); Para melhores resultados utilize os sistemas de cimentação de pinos da Superdont.

10 - Como alternativa pode usar cimento resinoso dual autocondicionante (siga as instruções de uso do fabricante!);

11 - Após a polimerização do material de cimentação construa o núcleo coronário ou complete a restauração conforme o caso;

12 - A técnica de reembasamento anatômico com resina pode ser empregada como alternativa.

Certifique-se de deixar o preparo com as paredes bem lisas e expulsivas.

13 - Após a cimentação aguarde um mínimo de 1h antes de fazer movimentos que possam deslocar o pino.

Formas de apresentação comercial:

Cód. 5P SPO 0

Emb. c/ 5 unid. Tam. 0

Cód. 10P SPO 0

Emb. c/ 10 unid. Tam. 0

Cód. 5P SPO 0,5

Emb. c/ 5 unid. Tam. 0,5

Cód. 10P SPO 0,5

Emb. c/ 10 unid. Tam. 0,5

Cód. 5P SPO 1

Emb. c/ 5 unid. Tam. 1

Cód. 10P SPO 1

Emb. c/ 10 unid. Tam. 1

Cód. 5P SPO 2

Emb. c/ 5 unid. Tam. 2

Cód. 10P SPO 2

Emb. c/ 10 unid. Tam. 2

***Ver dimensões no rótulo externo!**

Composição: Fibras de vidro unidas por resina epoxi.

Condições de armazenamento e transporte: entre 0 e 50oC em local limpo e seco.

Condições de manipulação: Uso único profissional. Proibido Reprocessar.

Descarte: Descartar como resíduo de saúde de acordo com as normas ambientais em vigor.

Advertências: Não estéril, uso único, uso profissional. O dispositivo pode fraturar sob altas cargas preservando a raiz de danos. Usar conforme técnicas descritas nas instruções de uso.

Precauções: Evitar contaminações com secreções ou óleo. Se isso ocorrer lavar com álcool, éter ou acetona, e secar. Não fazer desgastes laterais no pino.

Contra-indicações: Uso com cimentos de fosfato de zinco ou do tipo provisório. Uso em canais não obturados ou obturações com falhas.

Indicações: Ancoragem e estabilidade de coroas dentais.

Modo de ação: o dispositivo estabiliza as coroas dentais mediante ancoragem intracanal dentário. É pré condição de uso que o canal esteja obturado corretamente e sem sinais de falhas.

Efeitos Adversos: Não há.

ANVISA 80103859005

Resp. Técnico: Dr. Izio Mazur - CRO-RJ n.º 16.578

FABRICANTE:

SUPERDONT Ind. Com. Ltda

Rua 24 de Maio, 325 - Riachuelo
CEP: 20950-090 - Rio de Janeiro - RJ

C.N.P.J / MF: 03.141.310/0001-14

Inscr. Est. 759.062.34

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Tel.: (21) 2501-8634 / 6945

Site: www.superdont.com.br

E-mail: sac@superdont.com.br

