

**SUPERBAR – BARRA DE FIBRA SEMI-FLEXÍVEL**

(Nome Técnico: Fibra de Reforço Odontológico – 2101440)

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO ODONTOLÓGICO  
USO ÚNICO – PRODUTO NÃO ESTÉRIL**Instruções de Uso**

O Superbar é um produto à base de fibras de vidro longitudinais unidas por matriz de resina epóxi. Possui forma transversal cilíndrica e flexível.

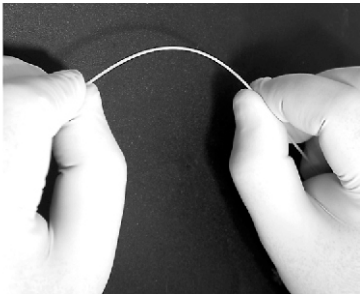
O dispositivo é usado como estrutura reforçadora de resinas dentais.

**APRESENTAÇÃO:**

Cód. SPB: Embalagem contendo  
3 barras de 10 cm x 1,6mm + instruções de uso

**COMPOSIÇÃO:** Fibras de vidro longitudinais unidas por resina epoxi

**INDICAÇÃO:** reforço estrutural de próteses fixas de resinas



**Reforça a construção de estruturas metal-free de próteses-fixas. Pode ser usada isolada ou em combinação com a fibra Superfiber.**

**PRECAUÇÕES - RESTRIÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS:**

- O produto deve ser utilizado somente por profissionais da área odontológica, devidamente capacitados e habilitados para a execução de tais procedimentos de acordo com as normas e práticas adequadas.
- Antes de utilizar a Barra de Reforço Semi-Flexível Superbar, recomenda-se o tratamento superficial da barra com aplicação de ácido fluorídrico a 10% sobre a sua superfície durante 90 segundos.
- Visando um melhor resultado, recomenda-se aplicar uma camada de silano sobre a superfície do mesmo.

**ADVERTÊNCIAS:**

- Produto Exclusivo para Uso Odontológico.
- Uso Único.
- Não estéril
- Proibido reprocessar
- Usar óculos de proteção e máscaras contra poeira por ocasião do corte ou ajuste do produto.
- O manuseio do produto deve ser realizado somente por profissionais especializados da área odontológica

ou médica de acordo com as normas e práticas adequadas a cada caso. O manual de instruções que acompanha o produto deve ser lido com atenção antes da realização de qualquer procedimento. Em caso de dúvidas apoio técnico do fabricante deverá ser solicitado.

**CONTRA INDICAÇÕES:**

Uso com materiais metálicos ou cerâmicos.  
Próteses fixas extensas.

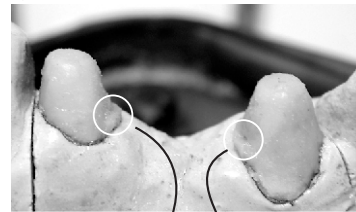
**EFEITOS ADVERSOS:** Não há.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

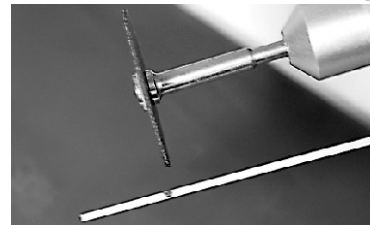
•Armazenar e transportar o produto em temperatura ambiente entre 2°C e 45°C em local limpo e seco.

**DESCARTE:**

Descartar como resíduo de saúde segundo normas ambientais em vigor

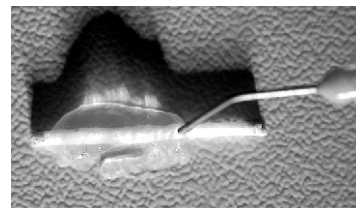
**TÉCNICA DE USO****1**

Confecção de casquete 0,3mm na resina de sua preferência. Deixar nicho na área circulada para acomodação da barra.

**2**

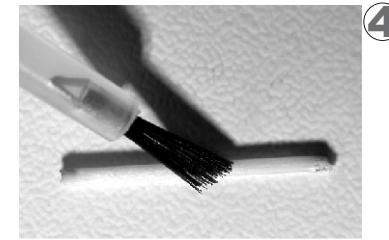
Cortar a barra no comprimento do espaço edêntulo.

O corte da barra deve ser realizado com discos rotatórios de corte. Não usar a broca, pois pode provocar esgarçamento.

**3**

Após o corte recomenda-se o tratamento superficial da barra primeiramente desengordurando-a com álcool seguido de aplicação de ácido fluorídrico a 10% durante 90 segundos. Lavar em seguida e secar bem. Tenha a certeza de que a barra encontra-se totalmente seca, caso contrário perderá resistência

Aplicar uma camada de silano. Após a secagem do mesmo repetir novamente a sua aplicação.

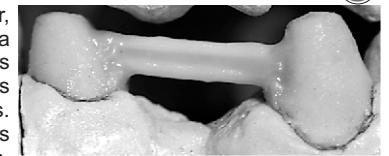
**4****5**

Depois de silanizada a peça, fixar as suas extremidades com resina nos nichos de apoio interdental. Em seguida cobrir toda a superfície da barra com uma camada de resina. Polimerize cada uma das etapas.

**6**

Se o espaço protético permitir, acrescentar mais uma barra repetindo os mesmos procedimentos das etapas anteriores.

**OBS.:** Separar ambas as barras com uma camada de resina.

**7**

Para efeito de máximo reforço, aplicar sobre a barra (previamente revestida com uma camada de resina) bem como sobre os casquetes, a fibra de reforço Superfiber<sup>®</sup> seguindo instruções do seu manual.

**8**

Caso encerrado de uma estrutura híbrida combinando fibra flexível + barra semi-flexível.

**OBS.:** A fibra de reforço Superfiber<sup>®</sup> não faz parte obrigatoriamente do Kit, sendo um produto à parte.

**SUPERDONT**<sup>®</sup>FABRICANTE: **SUPERDONT Ind. Com. Ltda**Rua 24 de Maio nº 325 - Riachuelo - Cep.: 20950-090 - Rio de Janeiro - RJ  
C.N.P.J / M.F.: 03.141.310/0001-14 - Inscr. Est. 759.062.34 - SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor  
Tel.: (21) 2501-8634 / 6945 - Site: www.superdont.com.br - E-mail: sac@superdont.com.br