

INSTRUÇÕES DE USO

PPE

Pasta de Polimento Espelhado Superdont

APRESENTAÇÃO:

O produto é apresentado em pasta em seringas plásticas dispensadoras + embalagem secundária em 2 modelos a saber:

Modelo 1 - Cod. PPE1: 01 Seringa de Pasta contendo 2g + cartucho de papel triplex;

INDICAÇÕES:

O produto se destina ao polimento final de compósitos e resinas dentais.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:

PPE - Pasta de Polimento Espelhado Superdont - Destina-se ao polimento final de compósitos dentais e resinas odontológicas em geral. Deve ser utilizada com instrumentos rotatórios acessórios de acabamento/polimento a base de silicones, borrachas, poliésteres, feltros, panos ou similares abrasivos ou não. Tais acessórios não fazem parte deste produto. O profissional deve seguir a técnica padrão de polimento aplicando a pasta PPE sobre a superfície a ser polida, com posterior esfregação com os instrumentos rotatórios em movimentos alternados circulares, horizontais, verticais e oblíquos. Sua fórmula suave, a base de terras raras ultrafinas como princípio ativo, ao ser atritada contra a superfície do material objeto de polimento, permite polir a sua superfície sem desgastes e sem produzir arranhões, conferindo assim um brilho liso e espelhado.

MODO DE USO:

1- A Superfície alvo a sofrer o polimento espelhado já deverá estar no seu formato e textura finais, acabada e lixada. O acabamento pode ser feito com pontas diamantadas de alta rotação para acabamento de resinas;

2- Após o acabamento, deve-se realizar o lixamento em baixa rotação utilizando pontas, rodas ou discos de média abrasividade;

3- Após o lixamento deve ser realizado o polimento com pontas, rodas ou discos de fina abrasividade. Esta fase já pode ser feita juntamente com a pasta PPE. Na maioria dos casos esse passo já será suficiente para se obter o efeito desejado.

4- Para resultados ainda melhores, visando um espelhamento vítreo, pode se realizar mais um passo utilizando discos ou rodas de pano, feltro ou algodão, todos sem abrasivos, juntamente com a pasta PPE.

IMPORTANTE: Evitar a geração excessiva de calor durante o uso. O produto obtém a sua melhor performance em temperaturas entre 30°C e 35°C.

COMPOSIÇÃO:

Óxido de terras raras, manteiga de cacau, agente tixotrópico, emulsificante, antioxidante e plastificante.

FICHA TÉCNICA:

Coloração: Cor rosa

Inodoro

Consistência: Pasta

Aspecto: Cera (Paladar levemente adocicado)

Atóxico

Lavável em água

Não estéril

Uso único

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Proteger do sol, calor e umidade.

Manter em temperatura entre 15°C e 30°C

Não utilizar após expirado o prazo de validade

CONDIÇÕES PARA O TRANSPORTE:

Pode ser transportado em temperaturas variando de 5oC até 40oC por até 30 dias, evitando umidade excessiva e luz do sol.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO:

O produto deve ser aplicado diretamente sobre a superfície a ser polida, que deverá estar limpa, na quantidade desejada pelo usuário. Proceder ao esfregação com instrumentos rotatórios de polir, em baixa rotação. Ao final do processo lavar com água corrente ou gaze umedecida. A forma de descarte do produto deve se dar de acordo com as normas ambientais vigentes.

ADVERTÊNCIAS:

Uso único;

Não estéril;

Uso exclusivo do cirurgião-dentista;

Manter em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C;

Utilizar conforme as instruções de uso;

Suspender o uso em caso de hipersensibilidade ou quaisquer reações anormais detectadas;

Não utilizar o produto com validade vencida ou embalagem violada;

Em caso de contato com a pele ou mucosas, lavar com água corrente;

Em caso de contato com os olhos ou ingestão acidental em grande volume, procurar imediatamente ajuda médica bem como lavar os olhos abundantemente com água limpa corrente;

Evitar a geração de calor excessivo durante o uso. O produto funciona melhor entre 30° e 35°C. Não passar de 50°C.

PRECAUÇÕES:

Manter a tampa bem fechada até o final (fechamento incorreto poderá permitir a entrada de ar e o ressecamento do produto, entupindo a saída; Em caso de entupimento tente aquecer levemente o frasco (cuidado para não derreter a seringa de plástico);

Proteger as mucosas com isolamento absoluto ou vaselina sólida;

Proteger os olhos da equipe e do paciente com óculos de proteção; Usar EPIs.

Não utilizar velocidades altas na baixa rotação;

Não pesar a mão durante o procedimento para evitar superaquecimento e hiperemia pulpar; Trabalhar pincelando;

Usar com cautela em pacientes com histórico de alergias; Suspender o uso em caso de sensibilidade;

Não expor a embalagem à luz do sol, umidade ou calor excessivo;

CONTRAINDICAÇÕES:

Uso em pacientes sabidamente sensíveis aos componentes da fórmula;

Utilização para fins diferentes das indicações de uso;

Não recomendando como pasta profilática;

EFEITOS ADVERSOS:

Pode causar irritação ou sensibilidade das mucosas;

A instrumentação rotatória pode produzir aerossóis e depositar partículas à distância ou nos olhos do paciente e da equipe;

PPE

Pasta de Polimento Espelhado Superdont

COMPOSIÇÃO: Óxido de terras raras, manteiga de cacau, agente tixotrópico, emulsificante, antioxidante e plastificante.

Fabricado no Brasil por: SUPERDONT Ind. e Com. Ltda.

Rua 24 de Maio 325 - Riachuelo - Rio de Janeiro/RJ - Brasil - Cep: 20950-090

Aut. Funcionamento ANVISA: 801038-5

Serviço de Apoio ao Consumidor: sac@superdont.com.br

Fone: 21 2501-8634 **Site:** www.superdont.com.br

CNPJ: 03141310/0001-14 - Insc. Estadual: 75906234 - Indústria Brasileira

Resp. Téc.: Dr. Izio Mazur - CRORJ 16578

ANVISA: 80103850028

SUPERDONT®