

Nome Técnico: Adesivo Odontológico
Código: 2101011

APRESENTAÇÃO:

Código FB2: For Bracket 2g: Contém 1 seringa com 2g de adesivo + 1 bico aplicador.
Código FB4: For Bracket 4g: Contém 1 seringa com 4g de adesivo + 1 bico aplicador.

INDICAÇÕES:

Produto de uso exclusivo do cirurgião-dentista destinado à fixação/colagem de brackets ortodônticos na superfície dental.

COMPOSIÇÃO:

Dimetacrilatos de alto e baixo peso molecular, Cargas minerais micro e nanoparticuladas, fotoiniciador, BHT, pigmento.

MODO DE USO:

Isolamento: Preferencialmente com lençol de borracha. Não deixar a saliva contaminar o esmalte; Preparo da superfície dental: remoção da placa bacteriana com pastas isentas de óleo e flúor bem como qualquer substância gordurosa. Lavar e secar bem com ar isento de óleo ou umidade.

Ataque ácido: aplicar ácido fosfórico a 37% no esmalte dental durante 20/30s, exatamente sobre o ponto onde se pretende fixar o bracket. Deverá se formar uma zona esbranquiçada revelando a desmineralização. Se esta não se formar, em esmaltes resistentes ao ataque ácido, poderá ser requerido um tempo maior de aplicação de ácido.

Lavagem: Aplicar água em abundância por 30s e secar com ar isento de óleo e umidade.

Colagem do Bracket: A superfície de adesão do bráquete deve estar limpa e desengordurada. Para uma melhor retenção pode ser feito um jateamento nessa superfície. Se o bracket for do tipo cerâmico, pode aplicar silano. Em seguida acoplar o bico aplicador na seringa e injetar uma pequena quantidade de ForBracket na superfície interna do bracket e posicioná-lo exatamente sobre a superfície ácido-atacada no dente, onde se deseja fixá-lo. Fazer uma leve pressão sobre o bracket contra o dente para melhorar o contato íntimo. Ajustar o posicionamento do mesmo.

Remoção dos excessos: remova os excessos de cimento antes da fotopolimerização tomando o cuidado para não deslocar o bracket.

Fotopolimerização: fotopolimerize o adesivo por 20s nas margens do bracket, mantendo a ponteira do fotopolimerizador o mais próximo possível da linha do adesivo. Importante: fotopolimerizadores com potência inferior a 400mW/cm² podem necessitar de tempo de fotopolimerização maior. Embora os arcos possam ser inseridos imediatamente após a colagem dos brackets, é recomendável aguardar um período de 24h para este passo.

Remoção dos brackets: ao finalizar o tratamento ortodôntico remover os bráquetes através de procedimentos padrão. O adesivo residual nos dentes pode ser removido com brocas de baixa rotação específicas ou discos abrasivos de acabamento. Tome cuidado para não danificar o esmalte dental. Faça em seguida um polimento do esmalte.

PRAZO DE VALIDADE:

3 anos a contar da data de fabricação. O frasco deve ser mantido fechado quando não estiver em uso a fim de evitar ressecamento ou polimerização por possível contato com a luz do ambiente.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Proteger da luz, calor e da umidade. Manter em temperatura entre 02°C e 27°C (recomendável sob refrigeração). Não utilizar após expirado o prazo de validade.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO:

Evitar incidir luz forte sobre o material durante o manuseio. Utilizar sob temperatura ambiente a fim de facilitar o escoamento pelo bico aplicador. Quanto mais baixa a temperatura do material, menor a fluidez e mais força se requer para ejetar o produto. Descartar os resíduos de acordo com a legislação ambiental vigente

ADVERTÊNCIAS:

Não-estéril. Uso único. Uso exclusivo do Cirurgião-Dentista. Proteger de fontes de luz e calor antes de usar. Pode polimerizar se exposto sem proteção à luz do refletor ou do ambiente. Pode polimerizar espontaneamente se exposto a altas temperaturas. Usar com cautela utilizando proteção nas mucosas dos pacientes sabidamente sensíveis aos metacrilatos. Utilizar os EPI's adequados para pacientes e equipe de atendimento. Não armazenar nem utilizar conjuntamente com materiais a base de eugenol. Aproximar o máximo possível o fotopolimerizador sem encostar no material. Se o seu fotopolimerizador for antigo, fazer um teste prévio de bancada para verificar se há necessidade de aumentar o tempo de aplicação do aparelho. Sob baixas temperaturas a ejeção do material poderá exigir muita força. Temperaturas mais altas facilitam a dispensação. Para evitar que o material continue fluindo pelo bico após a ejeção, puxe o êmbolo para trás. Usar exclusivamente para a finalidade de adesão de brackets ortodônticos ao dente.

PRECAUÇÕES:

Evite o contato com a mucosa, pele e olhos. Caso haja contato com os olhos lave imediatamente com água e procure um oftalmologista imediatamente.
Utilize luvas para manusear o produto.
Evitar o uso em pessoas sabidamente alérgicas aos metacrilatos.
Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão. Se houver irritação, consulte um médico.
Utilize todos os EPI's adequados para o paciente e equipe.
O ácido fosfórico pode causar queimaduras e lesões oculares. Leia as instruções de segurança do fabricante do produto.
Manter o produto longe de fontes de calor, luz intensa ou vapores de eugenol. A luz e o calor provocam polimerização enquanto o eugenol inibe essa reação.

CONTRAINDICAÇÕES:

Historia de hipersensibilidade aos componentes do produto e aos acrílicos. Finalidade diversa da colagem de brackets ortodônticos.

EFEITOS ADVERSOS:

Não são esperados, desde que seguidas estritamente as instruções de uso.

DADOS TÉCNICOS:

Pasta semiviscosa, semitransparente, odor característico metacrílico, sensível à luz, pH neutro. Após polimerização forma uma massa acrílica rígida. Reação de cura: Fotopolimerização por luz visível (aparelho para polimerização de resinas com um mínimo de 400mW/cm² de potência e comprimento de onda entre 360nm e 490 nm; Produto não-estéril.

FOR BRACKET

Adesivo Fotopolimerizável para Brackets Ortodônticos.

COMPOSIÇÃO: Dimetacrilatos de alto e baixo peso molecular, Cargas minerais micro e nanoparticuladas, fotoiniciador, BHT, pigmento.

Fabricado no Brasil por: SUPERDONT Ind. e Com. Ltda.

Rua 24 de Maio, 325 - Riachuelo - Rio de Janeiro - RJ - Brasil CEP: 20950-090

Aut. Funcionamento ANVISA: 801038-5

Serviço de Apoio ao Consumidor: sac@superdont.com.br

Fone: 21 2501-8634 Site:www.superdont.com.br

CNPJ: 03141310/0001-14 - Insc. Estadual: 75906234 - Indústria Brasileira

Resp.Téc.: Dr. Izio Mazur - CRORJ 16578

ANVISA: 80103859011